

Self-Vaginal FLOQSwabs with breakpoint

ก้านเก็บตัวอย่างจากช่องคลอดด้วยตนเอง
Self-Vaginal FLOQSwabs ชนิดหักก้านได้

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง

1. ล้างมือให้สะอาด
2. เลือกท่าเก็บตัวอย่าง เช่น ท่านั่ง หรือ ท่ายืน
3. หมุนแปรงเก็บตัวอย่างออกจากหลอดพลาสติก
ระวังอย่าให้มือสัมผัสผิวแปรง
4. จับแปรงที่ตำแหน่งขีดสีแดง สอดแปรงเข้าไปในช่องคลอด
หมุนแปรงอย่างน้อย 4 รอบ หรือประมาณ 10-30 วินาที
5. นำแปรงออกจากช่องคลอด จากนั้นนำเก็บใส่ในหลอดพลาสติก

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ระหว่างมีรอบเดือน ช่องคลอดมีเลือดไหลผิดปกติ
หรือมีอาการเจ็บช่องคลอด
- ห้ามใช้ระหว่างตั้งครรภ์ หรือในช่วงระยะเวลา 3 เดือนหลังคลอด
- ห้ามใช้หลังจากเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดทางสูติรีเวช
- งดใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับช่องคลอด อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเก็บตัวอย่าง
- งดการมีเพศสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 วัน ก่อนเก็บตัวอย่าง
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขรุขระ หีบห่อเสียหาย หรือหมดอายุ
- ห้ามใช้ซ้ำ

**คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลาก
และเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้**



นำเข้าโดย : บริษัท ซี เมดิค จำกัด

ขพ.283/2566

592/260-261 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-197-8652